



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Número: 020

Data de elaboração: 04/08/2016

Data de Revisão:

PROCESSO: Esterilização

TAREFA: Organização de carga da autoclave

1. **OBJETIVO:** Abastecer a autoclave de forma a respeitar a capacidade máxima recomendada, permitindo que o vapor penetre em todas as regiões dos pacotes e que o processo de esterilização seja efetivo.
2. **EXECUTANTE:** Equipe de Enfermagem e auxiliar de saúde bucal.
3. **PERIODICIDADE:** Sempre que necessário.
4. **RECURSOS NECESSÁRIOS:**
 - Equipamentos de proteção individual (máscara e luvas);
 - Autoclave
5. **PRINCIPAIS PASSOS:**
 - Carregar a autoclave, dispendo os artigos e pacotes verticalmente e não compactá-los;
 - Respeitar distância mínima de 1 cm entre os pacotes;
 - Posicionar materiais côncavos (bacia, cuba rim) no sentido vertical ou com a concavidade levemente lateralizada;
 - Respeitar o volume máximo de preenchimento da câmara (80%);
 - Registrar em planilha própria, tipo de pacotes e quantidades;
 - Fechar a porta da autoclave;
 - Realizar o ciclo de esterilização de acordo com instruções do fabricante;
 - Os pacotes, após o ciclo completo de esterilização, devem ser resfriados naturalmente antes do manuseio para reduzir o risco de obtenção de pacote molhado;
 - Não colocar os pacotes sobre superfícies frias após a esterilização para que não haja condensação;
 - Encaminhar material esterilizado para a sala de estocagem distribuição.
 - **RECOMENDAÇÕES:**
 - Evitar esterilizar materiais têxteis e caixas de instrumentos na mesma carga. Se ocorrer, colocar os materiais têxteis na parte superior e os instrumentais na parte inferior;

- Limpar a câmara interna do equipamento no mínimo semanalmente, conforme recomendação do fabricante.

6. REFERÊNCIAS:

- Brasil. RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE MARÇO DE 2012. Agência nacional de vigilância sanitária. Ministério da saúde;
- 3M Brasil. Soluções Integradas para Saúde. Esterilização. Programa de Certificação em Monitorização da Esterilização. Disponível em: <http://multimedia.3m.com/mws/media/5378370/esterilizao.pdf> Acessado em [01/08/2016];
- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas Recomendadas, 6 ed. São Paulo: SOBECC; 2013.

Elaborado por: GT-Saúde

Aprovado: