



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Número: 015

Data de elaboração: 01/08/2016

Data de Revisão:

PROCESSO: Desinfecção

TAREFA: Desinfecção terminal de pontas de uso odontológico

1. **OBJETIVO:** Reduzir a carga microbiana, removendo contaminantes de natureza orgânica e inorgânica, garantindo a eficácia do processo de desinfecção.
2. **EXECUTANTE:** Auxiliar de Saúde Bucal.
3. **PERIODICIDADE:** A cada paciente.
4. **RECURSOS NECESSÁRIOS:**
 - Material para Limpeza: água potável, detergente neutro, bucha, escova, compressa de gaze e álcool a 70%;
 - Equipamento de Proteção Individual: óculos de proteção, máscara, gorro, luvas de procedimento;
5. **PRINCIPAIS PASSOS:**
 - Realizar lavagem em água corrente e com detergente neutro para remoção de sujidades, desconectando acessório quando possível (motor, peça de mão, protetor de broca);
 - Realizar a inspeção visual para observar a presença de resíduos de sujidade, em caso positivo repetir o procedimento de lavagem;
 - Secar com compressa de gaze;
 - Com uma compressa de gaze embebida em álcool a 70%, realizar fricção sobre equipamento. Esperar evaporação do produto. Repetir procedimento três vezes;
 - Reconectá-los ao equipo odontológico;
6. **REFERÊNCIAS:**
 - Brasil. RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE MARÇO DE 2012. Agência nacional de vigilância sanitária. Ministério da saúde;
 - 3M Brasil. Soluções Integradas para Saúde. Esterilização. Programa de Certificação em Monitorização da Esterilização. Disponível em: <http://multimedia.3m.com/mws/media/5378370/esterilizao.pdf> Acessado em [01/08/2016];
 - SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas Recomendadas, 6 ed. São

Paulo: SOBECC; 2013.

Elaborado por: GT-Saúde

Aprovado: